

FICHA TÉCNICA RESPIRON KIDS



FABRICANTE: NCS INDÚSTRIA E COMÉRCIO-
CNPJ 55.198.741.0001-10
RESPIRON KIDS EXERCITADOR RESPIRATÓRIO
CÓDIGO DO PRODUTO: RE1000
ANVISA: 10424960001
VALIDADE: 5 ANOS
SIMPRO: 0172871
NCM: 90192090
CAIXA DE EMBARQUE: 45X32X33
CAIXA CONTÉM 24 UNIDADES

DESCRIPTIVO: EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO RESPIRON KIDS. FOI DESENVOLVIDO VISANDO O EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA INSPIRATÓRIA, ENTRE ELES O PRINCIPAL MÚSCULO, O DIAFRAGMA.

INDICAÇÕES: INDICADO PARA CRIANÇAS À PARTIR DE 4 ANOS, INDICADO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A ATELECTASIAS PULMONARES E A INICIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO RESPIRATÓRIO DE CRIANÇAS. PRODUTO LIVRE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA.

ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO.

É FABRICADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TRÊS COLUNAS DE ESFERAS COM CORES DIFERENTES E QUANDO EM MOVIMENTO TORNAM O EXERCÍCIO LÚDICO PERMITINDO CONSTATAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO TREINAMENTO. ACOMPANHA O APARELHO ADESIVOS. NA BASE DA PRIMEIRA COLUNA POSSUI UM ANEL REGULADOR, NUMERADO DE ZERO A TRÊS, PERMITINDO AUMENTAR O ESFORÇO ASSIM QUE VENCIDO O DESAFIO DO NÍVEL ANTERIOR E ASSIM SECESSIVAMENTE.

CARGA LIBERADA: DE 4 A 20 CMH2O

- **Ponteiro posicionado no "0":** fácil
- **Ponteiro posicionado no "1":** regular
- **Ponteiro posicionado no "2":** difícil
- **Ponteiro posicionado no "3":** muito difícil

MODELOS DISPONÍVEIS:

- RESPIRON KIDS
- RESPIRON EASY
- RESPIRON CLASSIC
- RESPIRON ATHLETIC 1
- RESPIRON ATHLETIC 2
- RESPIRON ATHLETIC 3

FICHA TÉCNICA RESPIRON KIDS

EMBALAGEM, CONTÉM OS DADOS DO FABRICANTE, N° DE REGISTRO ANVISA, DADOS DE REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CÓDIGO DE BARRAS. O LOTE É VISUALIZADO GRAVADO EM RELEVO NA EMBALAGEM E ABAIXO DO CORPO/ BASE DE ACRÍLICO DO EQUIPAMENTO. APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, DE USO INDIVIDUAL, NÃO AUTOCLAVÁVEL, DESCARTÁVEL, SEM TOXICIDADE, CONSTITUÍDO BASICAMENTE POR MATÉRIA PRIMA DE POLIESTIRENO CRISTAL, POLIETILENO E POLIPROLINENO.

É COMPOSTO POR:

- CORPO MONTADO 13.5 CM X 6.9 CM X 14.2 CM: POLIESTIRENO CRISTAL, ESFERAS E ANEL.
- MANGUEIRA 1,6CM X 26.6CM: POLIETILENO
- BOCAL 3.0 CM (EIXO MAIOR) X 1.6 CM (EIXO MENOR) 4X4: POLIPROPILENO
- PESO: 148 G

CONTRA- INDICAÇÕES: PACIENTES COM PNEUMOTÓRAX (PRESENÇA DE AR NA CAVIDADE PLEURAL). PORTADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES GRAVES SOMENTE DEVERÃO UTILIZA-LO APÓS A AUTORIZAÇÃO E INDICAÇÃO MÉDICA E/OU FISIOTERAPÊUTICA.

A ARMAZENAGEM DEVERÁ SER EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E AS CAIXAS DE ACONDICIONAMENTO DEVERÃO FICAR SOBRE ESTRADOS.

O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO POR EMPRESA REGULARIZADA PARA ESSA ATIVIDADE, OU SEJA, TRANSPORTE DE PRODUTOS CORRELATOS, SEMPRE AO ABRIGO DO CALOR, MANTENDO EM LOCAL FRESCO E SECO.

MODO DE USAR:

- SENTADO, DEITADO COM A CABECEIRA EM ELEVAÇÃO OU EM PÉ.

- O EXERCÍCIO PODERÁ SER FEITO DE DUAS FORMAS:

1) REALIZAR UMA EXPIRAÇÃO TRANQUILA, INSPIRAR DE FORMA LENTA E CONTÍNUA, MANTENDO UMA, DUAS OU TRÊS ESFERAS O MAIOR TEMPO POSSÍVEL EM ELEVAÇÃO.

2) REALIZAR UMA EXPIRAÇÃO TRANQUILA, INSPIRAR DE FORMA RÁPIDA E SUSTENTADA, MANTENDO UMA, DUAS OU TRÊS ESFERAS O MAIOR TEMPO POSSÍVEL EM ELEVAÇÃO.

- REALIZAR O TREINAMENTO 2X AO DIA COM 30 REPETIÇÕES CADA, DURANTE 4 SEMANAS.

FICHA TÉCNICA RESPIRON KIDS



COMO HIGIENIZAR O EQUIPAMENTO?

1. O RESPIRON KIDS É FABRICADO COM MATERIAIS TOTALMENTE INERTES (POLIESTIRENO, POLIPROPILENO), NEM MESMO QUALQUER TIPO DE COLA É UTILIZADA NA FABRICAÇÃO, PARA QUE NÃO SIRVAM DE MEIO DE CULTURA DE BACTÉRIAS. TODA MONTAGEM É FEITA UTILIZANDO SOLDAGEM POR ULTRA-SOM.
2. LAVAR O BOCAL ANTES E APÓS O USO, UTILIZANDO SOMENTE DETERGENTE NEUTRO E ÁGUA CORRENTE. A MANGUEIRA E O CORPO DO APARELHO DEVE SER HIGIENIZADO DA MESMA FORMA.

MODELOS DE EDITAIS PARA RESPIRON KIDS

-INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO COM BASE ACRÍLICA, GRADUADO EM 3 ESFERAS COLORIDAS PARA ATIVIDADE RESPIRATÓRIA.

-EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO UTILIZADO PARA O FORTALECIMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO DE NÍVEL MÉDIO BAIXO, COM SUPORTE ACRÍLICO, COMPORTA ESTRUTURA GRADUADA DE ESFERA COLORIDAS E BOCAL PARA A ATIVIDADE PULMONAR.

-INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO DE 3 FASES, COM ANEL REGULADOR BOCAL E MANGUEIRA PARA EXERCÍCIOS PULMONARES. INDICADO PARA CRIANÇAS.

O CONTROLE DE QUALIDADE É FEITO EM 100% (CEM POR CENTO) DAS UNIDADES FABRICADAS.

O MATERIAL DESCARTADO POR NOSSO CONTROLE DE QUALIDADE É REAPROVEITADO PELO FORNECEDOR ATRAVÉS DA LOGÍSTICA REVERSA.